

הוראות הפעלה למכשיר החיאה דיפברילטור מסוג הרטשיין

הוראות הפעלה למכשיר החיאה דיפברילטור מסוג g3



- 1 זהה כי המטופל מחוסר הכרה, לא נושם או נושם בצורה לא תקינה
- 2 חייג למוקד החרום 08-934-2999 ודווח
- 3 בצע פעולות החיאה:
לחץ חזק במרכז בית החזה בקצב של 100 פעמים בדקה
- 4 הדלק את המכשיר באמצעות לחיצה על הכפתור הירוק
- 5 חשוף את בית החזה של המטופל
- 6 משוך את הלשונית הירוקה ולאחר מכן הוצא את מגש המדבקות
- 7 הסר את סרט המגן והצמד את המדבקות לבית החזה של המטופל בהתאם לאיור על גבי המדבקות
- 8 במקרה של המלצה למתן שוק חשמלי:
הרחק את הסובבים, צעק שוק חשמלי כולם להתרחק
- 9 לחץ על כפתור השוק הכתום בהתאם להנחיות המכשיר
- 10 המשך מיד ביצוע עיסויי חזה ופעולות החיאה ופעל בהתאם להוראות: מדי 2 דקות המכשיר יבדוק מתן שוק חשמלי

- 1 זהה כי המטופל מחוסר הכרה, לא נושם או נושם בצורה לא תקינה
- 2 חייג למוקד החרום 08-934-2999 ודווח
- 3 בצע פעולות החיאה:
לחץ חזק במרכז בית החזה בקצב של 100 פעמים בדקה
- 4 הדלק את המכשיר באמצעות לחיצה על הכפתור הצהוב והרמת המכסה האפור
- 5 חשוף את בית החזה של המטופל
- 6 פתח את אריזת האלקטרודות שנמצאת בחלקו הפנימי של המכסה האפור של המכשיר
- 7 הסר את סרט המגן והצמד את המדבקות לבית החזה של המטופל בהתאם לאיור על גבי המדבקות
- 8 במקרה של המלצה למתן שוק חשמלי:
הרחק את הסובבים, צעק שוק חשמלי כולם להתרחק
- 9 לחץ על כפתור השוק המהבהב באדום בהתאם להנחיות המכשיר
- 10 המשך מיד ביצוע עיסויי חזה ופעולות החיאה ופעל בהתאם להוראות: מדי 2 דקות המכשיר יבדוק מתן שוק חשמלי

